



SCHICK
DENTAL


G² Concept



Kurzanleitung zum Gebrauch der G2-Concept Modellsäge
Istruzioni d'uso Segamodelli G2-Concept




Die Modellsäge G2-Concept
Segamodelli G2 Concept

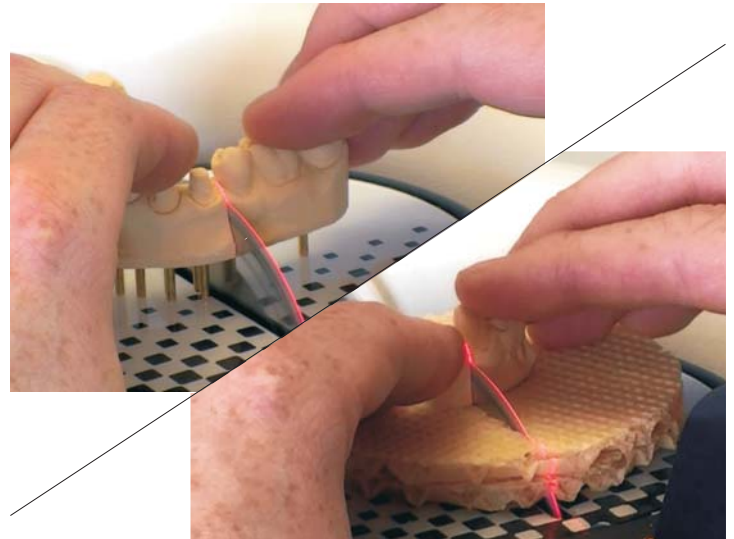

Die Zahnkränze können direkt oder mittels Trägerplatte zur Stabilisierung gesägt werden.
Infilare il modello da segare con i pins rivolti in basso con o senza supporto.




Zahnkranz an der letzten Karoreihe ausrichten und Schnittposition über den Laser anpeilen.
Allineare l'arcata sul ultima linea di quadrati neri e puntare la linea di taglio con il laser.

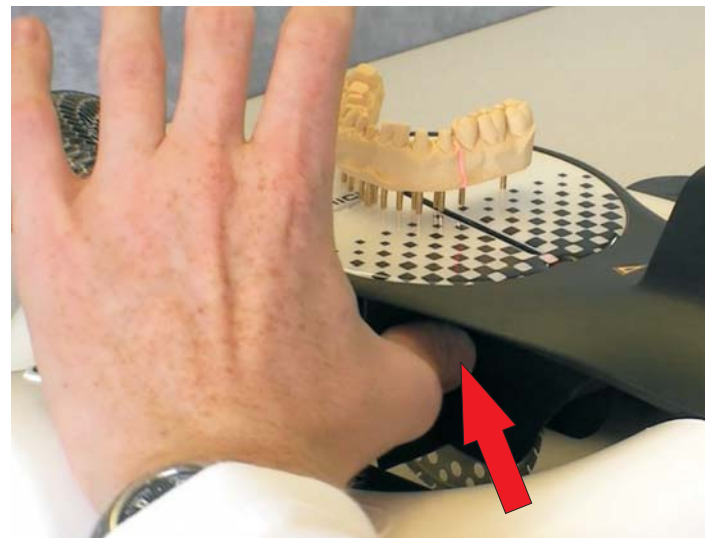

Mit den Daumen beidseitig unter die Sägewippe greifen...
Infilare tutti e due i pollici sotto il portamodelli...




... dabei die Handgelenke auf beide Anlaufsensoren legen.
 ...appoggiando i polsi sui due sensori di avviamento.

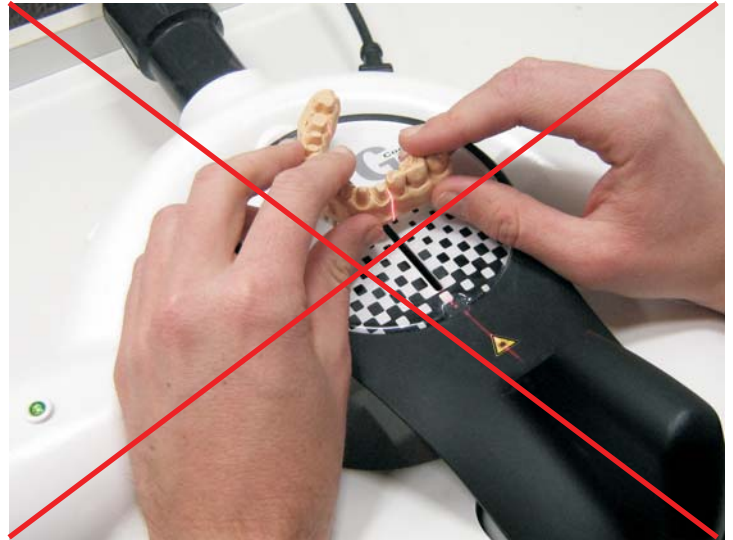

"Negativbeispiel"
 Daumen nicht im geschützten Bereich unter der Sägewippe - Handgelenke liegen nicht auf den Schutzsensoren!
Attention!
 I pollici sono esposti - assolutamente da evitare - I polsi non sono appoggiati sui sensori di sicurezza!



"Richtige Anwendung"
 Zahnkranz wird beidhändig (mit den Daumen unter der Sägewippe) fixiert - Handgelenke liegen auf den Sensoren.
 „Uso corretto“
 Allineare la posizione sul fascio laser sottile con esattezza e premere il modello leggermente verso il basso.

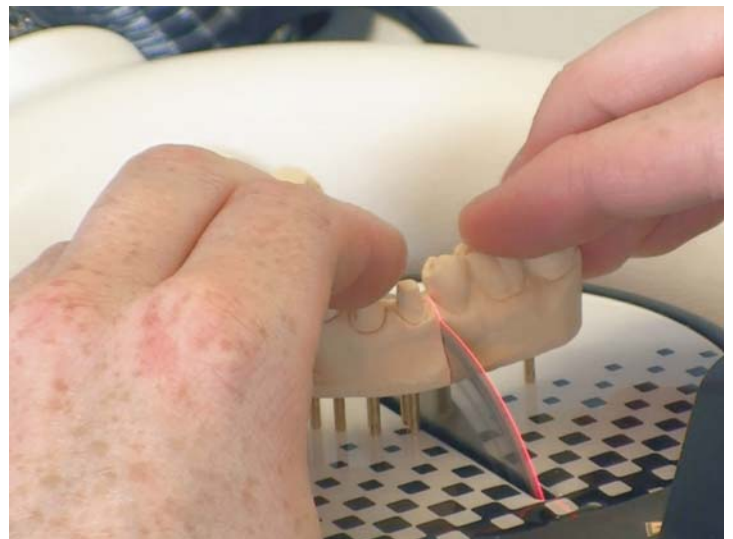

Sägeschnitt kann komplett erfolgen oder bis ca. 1-2mm unterhalb der Präparationsgrenze.
 Eseguire il taglio completo o lasciare ca. 1-2 mm di gesso.



Das rationell hergestellte Modell im professionellen Design!
La segamodelli G2 Concept costituisce il presupposto migliore per la
realizzazione del modello perfetto: il biglietto di visita di ogni
laboratorio!

Technische Änderungen vorbehalten
Ci riserviamo modifiche tecniche



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
E-Mail info@schick-dental.de
Internet www.schick-dental.de